

Pusse- og poleringsløsninger

Sof-Lex™

Spiral pusse- og poleringshjul



Vi har funnet opp
hjulet på nytt

3M ESPE

Vi har funnet opp hjulet på nytt



Sof-Lex™ spiral pusse- og poleringshjul – et allsidig hjelpemiddel etter konturering!

Sof-Lex™ systemet har i mange år vært blant tannlegenes favoritter for å oppnå estetiske og gode restaureringer. Nå har 3M ESPE oppfunnet hjulet på nytt og introduserer et innovativt design som gjør pussing og polering enklere. Med en to-trinns arbeidsprosess kan du raskt polere restaureringer til høyglans, og hjulet tilpasser seg alle overflater - fra alle vinkler.

En fasong til alle overflater.

Den innovative, fleksible formen tilpasser seg enkelt ujevne, konvekse og konkave tannoverflater. Anteriore og posteriore restaureringer kan pusses og poleres med ett hjul for hver arbeidsgang - det er ikke nødvendig å skifte mellom points, gummikopper, skiver og børster.

“The spiral wheels are unparalleled in their ability to adapt to hard-to-reach places such as line angles and occlusal grooves.”

Dr. Bob Marolt, DDS

En fasong til alle vinkler.

Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er enkelt å jobbe med - spesielt i det posteriore området. Dette skyldes at de slipende partiklene er inkorporert i hele hjulet, slik at alle overflater på spiralhjulet kan brukes: oversiden, undersiden og kanten. Derfor er spiralhjulet effektivt fra alle vinkler.

Indisiert for pussing og polering av forskjellige direkte og indirekte restaureringer:

Kompositt

Resinmodifiserte glassionomer

Temporære materialer (bisakryl)


Resin nano-keramikk –

Lava™ Ultimate CAD/CAM materiale

Edle og halvedle legeringer



Okklusalt

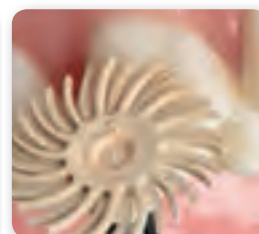

Bukkalt




Lingualt posterior



Lingualt anterior



Facialt

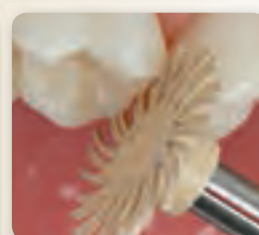

Approksimalt

Gir enkelt og raskt en naturlig glans.

Det fine pussehjulet (beige) glatter og fjerner riller som har oppstått under konturering av restaureringen. Slik forberedes overflaten til høyglanspolering. Det superfine poleringshjulet (hvitt) gir en særdeles glatt overflate med høyglans, spesielt for nanokompositt som f.eks. Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative. Et enkelt system for rask polering av restaureringer og med naturlig glans som resultat.

For å oppnå det beste resultatet brukes det gjennom hele prosessen et lett til moderat trykk og et håndstykke med lav hastighet. Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er til engangsbruk og brukes uten pasta og vannkjøling, noe som gir ytterligere tidsbesparelser.




Sof-Lex™ spiral pusse- og poleringshjul gir en blank og skinnende overflate bedre enn, eller på nivå med, ledende produkter på området.



Sof-Lex™ XT skiver



Enhance®/PoGo®

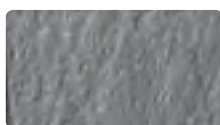

Occlubrush®



OneGloss®



Opti 1 Step












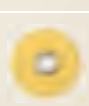

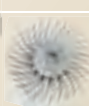










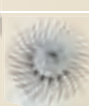





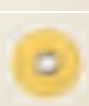

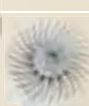

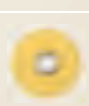

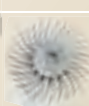

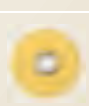

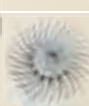
Prøveeksemplarer av Filtek™ Supreme XTE Universal ble laget og deretter behandlet med sandpapir korn 320 for å oppnå en ensartet, typisk klinisk relevant pusset overflate før polering. SEM bilder (forstørret 500X) viser overflateglattheten etter polering av prøvene med forskjellige poleringssystemer.
Kilde: 3M ESPE interne data

“The flexible wheels are kinder to the gingival tissues compared to other types of rotary tools.”

Dr. James Braun, DDS, MS

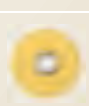Systemet Sof-Lex

Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er utviklet for å passe med det eksisterende Sof-Lex systemet, og kan derfor brukes med samme mandrill som skivene.

	Sof-Lex™ skiver	Sof-Lex™ XTskiver	Sof-Lex™ Strips	Sof-Lex™ spiral hjul	Anteriort	Posteriot	Approximant
GROV REDUKSJON	<ul style="list-style-type: none"> Fjerning av overskudd Utforming av anatomi Fjerning av inhibert lag   	<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon av overflateruhet Avsluttende konturering av anatomi og margin   	<ul style="list-style-type: none"> Fjerning av riller Overflateglatthet Forpolering    	<ul style="list-style-type: none"> Høyglanspolering    	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ skiver, grove Roterende grove eller medium kontureringsinstrumenter (f.eks. diamanter, karbidbor, stener) 	<ul style="list-style-type: none"> Roterende grove eller medium kontureringsinstrumenter (f.eks. diamanter, karbidbor, stener) 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ XT skiver, grove Sof-Lex™ strips Grove/medium, smal
SISTE KONTURERING	<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon av overflateruhet Avsluttende konturering av anatomi og margin   	<ul style="list-style-type: none"> Fjerning av riller Overflateglatthet Forpolering    	<ul style="list-style-type: none"> Høyglanspolering    	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ skiver, medium Roterende medium eller fine kontureringsinstrumenter (f.eks. diamanter med gul eller rød ring) 	<ul style="list-style-type: none"> Roterende medium eller fine kontureringsinstrumenter (f.eks. diamanter med gul eller rød ring) 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ XT skiver, medium Sof-Lex™ strips Grove/medium, smal 	
PUSSING	<ul style="list-style-type: none"> Fjerning av riller Overflateglatthet Forpolering    	<ul style="list-style-type: none"> Høyglanspolering    	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral pussehjul Sof-Lex™ skiver, fine 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral pussehjul 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral pussehjul Sof-Lex™ XT skiver, fine Sof-Lex™ strips, fine/superfine 		
POLERING	<ul style="list-style-type: none"> Høyglanspolering    	<ul style="list-style-type: none"> Høyglanspolering    	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral poleringshjul Sof-Lex™ skiver, superfine 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral poleringshjul 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ spiral poleringshjul Sof-Lex™ XT skiver, superfine Sof-Lex™ strips, fine/superfine 		

Bestillingsinformasjon



Sof-Lex™ Spiralhjul – Introduksjonssett 50821

Artikkelnr. Produktbeskrivelse

50821 Sof-Lex™ Spiral hjul – Introduksjonssett
10 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige); 10 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvite); 1 stk. mandrill for vstk.

5080 Sof-Lex™ Spiral pussehjul – Refill
30 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige)

5081 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul – Refill
30 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvitt)

5082SK Sof-Lex™ Spiral hjul, skiver & strips – Systemsett
10 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige)
10 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvite)
Sof-Lex™ ekstra tynne poleringsskiver 12.7 mm:
30 hver av 2382C (grove); 2382M (medium); 2382F (fine); 2382SF (superfine)
Sof-Lex™ ekstra tynne poleringsskiver 9.5 mm:
30 hver av 2381C (grove); 2381M (medium); 2381F (fine); 2381SF (superfine)
Sof-Lex™ pussestrips: 15 stk. 1954C/M (grove/medium)
1 stk. mandrill for vstk.

1980 Sof-Lex™ skiver & strips – Systemsett
30 skiver av hver - grove, medium, fine og superfine i både 12.7 mm and 9.5 mm i diameter; 1 stk. mandrill vstk.

Sof-Lex™ skiver refill for konturering og polering

Hver refill inneholder 85 skiver.



2380 Sof-Lex™ ekstra tynne skiver & strips – Systemsett
30 skiver av hver - grove, medium, fin, og superfine i både 12.7 mm and 9.5 mm diameter, 1 stk- mandrill vstk.

Sof-Lex™ ekstra tynne skiver refill for konturering og polering

Hver refill inneholder 85 skiver.



Sof-Lex™ pussestrips refill

1954 Klar Grov/medium Inneholder 150 strips

1954N Klar Grov/medium – smal Inneholder 100 strips

1956 Blå Fin/superfin Inneholder 120 strips

3M™ ESPE™ Mandrill Refill

1983RA 3 vstk. mandriller for Sof-Lex™

1983HP 3 håndstk. mandriller for laboratorie-håndstk. for Sof-Lex™

1983FG 3 FG mandriller for turbin for Sof-Lex™



3M ESPE

3M Norge AS
3M ESPE
Postboks 100 2026 Skjetten
Telefon: 0 63 84
www.3MESPE.no

3M, ESPE, Filtek, Lava og Sof-Lex er varemerker hos 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Brukes under lisens i Canada. Alle andre varemerker tilhører andre firmaer.
©2013, 3M. All rights reserved.
BR61-N032-1.0/2013-04