



## Varios Combi Pro2


### Daglig vedlikehold

**Start hver morgen:** Slå på maskinen hver morgen med knappen på baksiden.

- **VIKTIG:**  
Bruk **subgingivalt pulver (PERIO/GLYCIN)** og **supragingivalt pulver (KALSIUMKARBONAT)** i hver sin separate pulverbeholder – de skal ha ulike trykk/pulverpartikkelstørrelse og **får ikke blandes**. Velg trykk manuelt: **Prophy- eller Perio Mode** avhengig av indikasjon. (OBS Jet-tip på Periohåndstykke skal/kan brukes på Prophy Mode)

---

### Etter hver Airpolish-behandling

1. Legg håndstykket i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler.
2. Sett opp vannvolumet til 10 på pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "W" (WATER) og trykk på "AC" igjen.
  - Maskinen skyller og rengjør slanger og håndstykker innvendig, en slange om gangen.
  - Tar ca 45 sekunder pr slange.
  - For IPIEZO: Gjør dette kun om du har brukt kjemikalier i beholderen.
3. Løft prophy- eller periohåndstykket ut av sin holder og trykk på nedoverpil:   
i 2 sekunder for å tømme pulverbeholderen for trykk.
  - Skal alltid gjøres ved bytte av beholder eller ved påfylling av pulver.
  - Trykk inn knappen på siden av beholderen for å løfte den opp.

## Rengjøring av håndstykkene

- Vaskes i desinfektor (helst i stativ for gjennomskylling), tørk nøye og autoklaver etter hver pasient. (Følg anbefaling for smittevern i odontologisk praksis, 2018.) (Eventuelt DAC-adaptere som nå er tilgjengelig)
  - Airpolish/Periopolish-håndstykkene kan skrues i fra hverandre og rengjøres i ultralydsbad. Enten om de er tette eller som rutine 1x pr. uke.
- 

### Kveld: Perio/Airpolish, pulversiden

1. Ta av pulverbeholderne, tøm ut pulveret og blås ut med trevegssprøyten.
2. Legg håndstykket i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler.
3. Sett opp vannvolumet til 10 på pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "P" (POWDER) og trykk på "AC" igjen.
  - Maskinen tømmer pulverbeholder, slanger og håndstykker innvendig for pulver, i tillegg til at de skylles grundig. Forebygger tett beholder og slanger.
  - Tar ca 45 sekunder pr slange.
4. Kjør maskinen uten pulver:
  - Kjør 10 sekunder, vent 10 sekunder, gjenta en gang til.
5. Børst bort alt løst pulver fra maskin, pulverbeholder og overgangene til håndstykkene.
  - Viktig: IKKE FUKT på disse deler!

### Kveld: Scalersiden og Perio/Airpolish, pulversiden

1. Ta av pulverbeholderne, tøm ut pulveret og blås ut med trevegssprøyten.
  2. Legg begge håndstykkene i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler. Sett opp vannvolumet til 10 på både scaler- og pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "D" (DUAL) og trykk på "AC" igjen. Begge sidene blir nå gjennomspylt.
-

**1-2 ganger i uken:**

**Dekontaminering / forebygging av biofilmvekst i maskinen/slangene (CLM Mode)**

1. Fyll CLM-flasken med B.Clean og sett den på maskinen (der den vanlige vannbeholderen sitter). Ta håndstykkene av slangene og sett slangene i CLM holderen. Trykk inn "CLM" knappen i 3-4 sekunder til det står CLM 10 på displayet. Trykk så inn "CLM" knappen en gang til i 3 sekunder til CLM programmet starter, når det står SET 10 på displayet kan du slå av maskinen og vente 12 timer.
2. Sett i gang maskinen og ta bort CLM flasken. Fyll på den vanlige vannflasken med vann og sett den på maskinen. Trykk på "CLM" knappen til gjennomskyllingen starter, dette er ferdig når det står FIN 10 på displayet.
  - Gjør denne prosedyren 1-2 ganger pr uke.

---

**Avslutningsvis**

- Smør o-ringene regelmessig, ca. en gang pr. uke. Bytt dem ca.hver tredje måned.
- Steng av maskinen.
- Håndstykkene vaskes i desinfektor og autoklaveres.
- Sprit av hele maskinen.

---

**OBS!** Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye og følge anbefalt vedlikehold.

---

**Lykke til!**

Se video om vedlikehold her:

<https://www.norway.nsk-dental.com/support/videos/>



Vi kan også anbefale våre kurs, se NSK Academy for mer informasjon:

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/no/kurs/>

